

ANLEITUNG ZUM CORONA-SELBSTTEST

Joinstar COVID-19-Antigen-Schnelltest (Latex)

1. TESTSET



im Uhrzeigersinn von oben:

- Testkassette (Teststreifen), eingeschweißt
- Einweg-Tüten zum Auffangen von Probenmaterial
- Einweg-Pipette
- Probenentnahmeröhrchen
- Packungsbellage

2. ALLGEMEINE HINWEISE

- Optimaler Zeitpunkt der Probenentnahme: Nach dem Aufstehen und vor dem Zähneputzen, Essen oder Trinken.
- Der Test sollte unmittelbar nach der Probenentnahme durchgeführt werden.
- Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Wenn sie 20 Minuten oder länger ungelesen bleiben, sind die Ergebnisse ungültig.

AUSWERTUNG DES ERGEBNIS

- **Positiv (+): Es erscheinen zwei farbige Linien.**
Eine farbige Linie sollte immer in dem Kontrollbereich (C) und eine weitere Linie soll in der T-Linien-Region sein.
- **WICHTIG:** Die Intensität der Farbe in den Testlinienbereichen kann abhängig von der Konzentration von SARS-CoV-2 in der Probe variieren. Daher sollte jeder Farbton (auch sehr helle Linien) im Bereich der Testlinie als positiv angesehen und als solcher gewertet werden.
- **Negativ (-): Eine farbige Linie erscheint im Kontrolllinienbereich (C).**
Im Bereich der T-Linie wird keine Linie angezeigt.
- **Ungültig: Kontrollzeile wird nicht angezeigt.**
Unzureichendes Probenvolumen oder nicht ordnungsgemäße Verfahrenstechnik könnten Gründe für einen Fehler sein. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testset.

ANLEITUNG ZUM CORONA-SELBSTTEST

Joinstar COVID-19-Antigen-Schnelltest (Latex)

3. HANDHABUNG



1. Mit Wasser den Mund spülen und ausspucken. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass sich keine Mundbakterien im gesammelten Auswurf befinden.

2. Husten Sie intensiv und machen Sie das Geräusch „Krruuu“ aus dem Hals, um Auswurf / tiefen Rachenspeichel aus dem hinteren Hals zu erhalten.

3. Sobald sich der Auswurf / Speichel in Ihrem Mund befindet, geben Sie ihn in den Behälter. Wiederholen Sie drei bis vier Mal, um eine ausreichende Menge für die Probe zu erhalten.



4. Schrauben Sie das Probenentnahmeröhrchen ab.

5. Frischen Auswurf / Rachenspeichel 200 µl aus dem Behälter in das Probenentnahmeröhrchen überführen.


6. Drehen Sie das Probenentnahmeröhrchen fest ein.



7. Kippen Sie das Fläschchen hin und her und mischen Sie den Inhalt vollständig.

8. Nehmen Sie die Testkassette aus der Verpackung und legen Sie sie flach auf den Tisch.

9. Trennen Sie den Oberbestand des Sammelröhrchens ab.

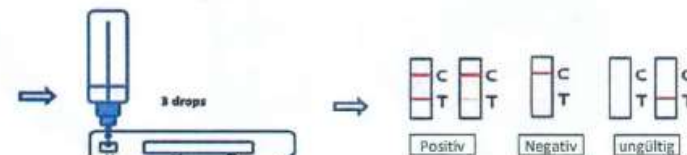

10. Geben Sie drei Tropfen der Probe senkrecht in das Probefeld.

11. Das Ergebnis können Sie nach 15 Minuten ablesen. Wenn Sie nach 20 Minuten oder länger kein Ergebnis entnehmen können, ist der Test ungültig, und es wird zu einem Wiederholungstest empfohlen.

Was tun, im Falle einer Positiv-Testung ... siehe nächste Seite!

Sollte ein am Samstagabend durchgeführter **Selbsttest positiv** ausfallen, dann ist für die betreffende Person folgendes Formular auszufüllen (auch als Anlage angefügt):

<https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Bescheinigung-Vorliegen-eines-positiven-oder-negativen-Antigen-Selbsttests.pdf>

--> vermerken Sie bitte auf diesem Formular "**Osterreiter**" und schicken es **per Fax an 03591-5251 53299 oder per Mail** an das Postfach infektionmeldungen@lra-bautzen.de

Auf der Rückseite des Formulars finden Sie Verhaltenshinweise für die Betroffenen. Wichtig ist die sofortige Selbstisolation und Information der Angehörigen des Hausstandes. Auch diese müssen ihre Kontakte sofort reduzieren.

Es hat zeitnah eine PCR-Testung zur Bestätigung des Verdachtes zu erfolgen.

Nach Posteingang werden sich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unverzüglich mit Ihnen in Verbindung setzen und die PCR-Testmodalitäten besprechen.

Der PCR-Test kann im Gesundheitsamt in Bautzen erfolgen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit alternativ den Bereitschaftsdienst oder Hausärzte aufzusuchen.

Die Corona-Hotline für sonstige Anfragen ist am Ostermontag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar unter der Nummer: 03591-5251 12121